

Návod k použití

POPIS PRODUKTU:

Vyztužený ortopedický límec s polyuretanové pěny s odnímatelnou zpevňující polypropylénovou vložkou. Límec je anatomicky vyprofilován s antibakteriální a protiplísňovou úpravou.

Zapínání na suchý zip.

Dostupné barvy: bílá, šedá, černá.

APLIKACE A POUŽITÍ :

Ortéza měla být používána podle pokynů lékaře nebo fyzioterapeuta.

INDIKACE:

- Dysfunkce krční oblasti: poškození svalů a vazů,
- Přetížení a záněty,
- Meziobratlové dysfunkce, poškození meziobratlových plotének (Radikulární bolesti, související bolesti),
- Artróza, revmatické choroby, doléčování modřin, výronů, zlomenin.

ÚDRŽBA:

Perte ručně při teplotách do 35° C jemnými pracími prostředky. Nechlорujte, nečistěte chemicky, neždímejte, před sušením jemně vytlačte. Sušte daleko od zdrojů umělého tepla. Nežehlete.

ZÁRUKA:

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí / zakoupení výrobku a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv opravě, opravě nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem než prodávajícím (pokud není tato činnost popsána v návodu).

Reklamacе se uznává jen na základě předloženého řádně vyplněného záručního listu a reklamovaného výrobku.



POZOR!

Nedodržování osobní hygieny, používání nesprávných čistících prostředků může způsobit odřeniny nebo jiné komplikace spojené se zvýšenou potivostí a rozvojem bakteriální flóry. Nepoužívejte ortézu na gely a rozehrívající masti. Vezměte prosím na vědomí, že zbytky pracího prostředku mohou způsobit podráždění kůže a poškodit materiál z něhož byl produkt vyroben.

KONEČNÉ ROZHODNUTÍ O POUŽITÍ A VÝBĚRU POMŮCKY JE NA ODBORNÉM LÉKAŘI NEBO TERAPEUTOVI

*	29,5-32,5	32,6-35,5	35,6-38,5	38,6-41,5	41,6-44,5	44,6-47,5
* 7	A1	A2	A3	A4	A5	A6
** 8,5	B1	B2	B3	B4	B5	B6
* 10	C1	C2	C3	C4	C5	C6
* 12	D1	D2	D3	D4	D5	D6

* průměr krku (cm) ** výška límce (cm)



VÝROBCE: mdh sp. z o.o., 90-349 Łódź, ul. Ks. W. Tytmienieckiego 22/24, Polsko, Tel. + 6748384 fax + comp/m.4842,. 48426365221,
www.mdh.pl, www.qmedinfo.pl



Tento výrobek je ve shodě se směrnici ES 93/42/EWG pro medicínské produkty.

